

ISO 13485
BUREAU VERITAS
Certification



NAUSICAA
MEDICAL

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL

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
POUR TOUS FAUTEUILS



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :
EMPÊCHER LE GLISSEMENT
DU BASSIN VERS L'AVANT ET
MAINTENIR LE BUSTE DROIT

Périmètre maximum utile : + 230 cm
Boucle : 40 mm

Fabriqué en complexage de mousse, il procure un confort complet.
Décliné en 3 tailles S, M, L
Périmètre maximum utile : 230 cm
Tour de taille (en cm)



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



CBIM2HP-PF

v 06.10/23

Matériaux textiles
conformes à la législation
REACH
sur les substances indésirables

 NAUSICAA Médical
12 Allée du Plot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montueux
FRANCE



Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



BODY DE MAINTIEN INTÉGRAL

Composition
Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

- Positionner la partie pelvienne du body sur l'assise du fauteuil, la partie étroite de la pelvienne sur le dessus de l'assise du fauteuil, et côté dossier.
- Placer la sangle 1 autour du dossier, ajuster fermement et fermer la boucle de fixation rapide.
- Faire asseoir le patient sur le fauteuil.
- Faire passer le body entre les jambes du patient, relever le body contre le buste et passer la tête entre les bretelles.
- Ajuster la partie pelvienne pour éviter les plis.
- Passer la sangle 2 derrière le dossier.
- Enfiler une des extrémités de la sangle dans la boucle formée à l'extrémité de la sangle 3.
- Fermer la boucle de fixation rapide de la sangle 2 et l'ajuster au plus prêt sans comprimer l'abdomen.
- Ajuster la longueur de la sangle 3 au plus court, pour éviter le basculement vers l'avant du patient en veillant à ne pas comprimer son thorax.

