



Aide aux choix : sangle de lève-personnes et de verticalisateurs

Les sangles Nausicaa Médical s'utilisent avec tout lève-personne ou rail de transfert pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou. Les sangles Nausicaa Médical s'utilisent avec tout verticalisateur pourvu d'un système d'accrochage par crochet 2 points. Conformément au document de l'ANSM « compatibilité entre dispositifs médicaux » de Juillet 2007: les sangles Nausicaa Médical sont conformes à la norme EN ISO 10535 : 2021 et notre processus de gestion des risques démontre que l'utilisation des sangles Nausicaa Médical avec des lève-personnes ou rail de transfert pourvu d'un système d'accrochage par crochet 2 à 4 points ou des verticalisateurs pourvu d'un système d'accrochage par crochet 2 points, n'engendre pas de risques supplémentaires par rapport au dispositif d'origine ». Si vous avez un doute sur une compatibilité, nous vous invitons à contacter le responsable commercial de votre secteur.

| | SANGLES RECOMMANDÉES POUR LE TRANSFERT | | Sangles recommandées pour la toilette et mise au WC. Ne peuvent rester sous le patient. |
|--|---|---|---|
| | SANGLE HAMAC (Peut rester sous le patient) | SANGLE EN U (Ne peut pas rester sous le patient) | |
| Perte de tonicité membres inférieurs avec maintien de buste et avec maintien de tête | Sangle hamac | Sangle en U Sangle en U à réglage rapide | Sangle de toilette Sangle de toilette confort Sangle en U de transfert rapide |
| Perte de tonicité membres inférieurs sans maintien de buste et avec maintien de tête | Sangle hamac | Sangle en U Sangle en U à réglage rapide | Sangle de toilette Sangle de toilette confort |
| Perte de tonicité membres inférieurs sans maintien de buste et sans maintien de tête | Sangle hamac avec option tête | Sangle en U à dossier Sangle en U à réglage rapide avec option tête Sangle en U ergonomique | |
| Patient amputé | Sangle hamac sans croisement | | |
| Patient agité/anxieux | Sangle hamac sans croisement | Sangle en U enveloppante Sangle en U à dossier | |
| Patient spastique | Sangle hamac sans croisement avec option tête | Sangle en U à dossier Sangle en U à réglage rapide avec option tête Sangle en U ergonomique | Sangle de toilette avec option tête Sangle de toilette confort Sangle en U à réglage rapide |
| Patient dépendant physique et psychique | Sangle hamac | Sangle en U enveloppante Sangle en U à dossier Sangle en U à réglage rapide avec option tête Sangle en U ergonomique | |
| Contre-indication de constrictions des hanches | Sangle Hamac sans croisement | Sangle de transfert rapide | Sangle de transfert rapide |

Verticalisateurs

- **SANGLE DE VERTICALISATEUR PREMIUM (réf.: SWYP)**
Préconisée pour les patients en manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste.

Cette sangle peut être utilisée avec notre verticalisateur EASYLEV, WAYUP et WAYUP GO. Elle peut être utilisée pour faire de l'aide à la déambulation avec le WAYUP. Elle dispose d'une sangle sous fessière pour permettre un transfert semi-assis.

- **SANGLE DE VERTICALISATEUR VERTICONFO)RT (réf.: SVVERTICONFP)**
Préconisée pour les patients en manque de tonicité partiel ou complet des jambes et du buste.

Cette sangle peut être utilisée avec notre verticalisateur EASYLEV, WAYUP et WAYUP GO.

- **SANGLE DE VERTICALISATEUR ECO (réf.: SXPECO2-PF-TU)**
Préconisée pour les patients en manque de tonicité uniquement des membres inférieurs.

Cette sangle peut être utilisée avec notre verticalisateur WAYUP.



Nous préconisons de contrôler l'état de la sangle avant chaque utilisation et de réaliser un contrôle périodique à minima 2 fois par an.

