



Sangle de transfert rapide

Facile à mettre en place dans un corset siège.

- Disponible uniquement en jersey confort
- Tailles S, M, L, XL

Sa forme en U élargie dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et améliorant la mise en place et le retrait de la sangle. Cette sangle dispose d'un bandeau large et d'une mousse dorsale. Cette sangle se positionne avec les bras vers l'extérieur. Le passage des sangles se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Elle évite la constriction des hanches quand elle est utilisée de manière décroisée. **Ce type de sangle est déconseillé aux patients à très faible tonicité.**

Réglage des accroches



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

Positionnement des sangles



DECROISÉ

Choix conseillé



CROISÉ ENTRE LES JAMBES

Choix conseillé



CROISÉ SOUS LES JAMBES

Choix secondaire



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	SATL-PF
OPTION	TABAL-PF (tête amovible et baleinée)