



[www.nausicaa-medical.com](http://www.nausicaa-medical.com)

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

## CEINTURE DE BUSTE Y SLIM

POUR TOUS FAUTEUILS



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
À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :  
PRÉVENIR LA CYPHOSE  
CERVICALE EN MAINTENANT  
LE BUSTE DROIT



Périmètre maximum utile : + 230 cm  
Hauteur de la ceinture : + 11 cm  
Largeur sangle : + 48 mm  
Boucle : 50 mm

Les hauteurs d'épaules sont réglables séparément dans le but d'aider au positionnement et à la compensation d'une mauvaise position.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm
- Tour de taille (en cm) :



CSY2HP-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



v 06.11/23

## Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



# CEINTURE DE BUSTE Y SLIM

## Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane

doublé de mousse polyuréthane

Biais 100 % polyester

Sangles 100 % polyester

Boucles nylon

Épaulières à mousse thermocompressée

- Mettre en place le baudrier, en positionnant bien les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil.
- Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne. Fermer la ceinture en utilisant la fermeture auto-agrippante.
- Ceinturer le patient et le dossier du fauteuil avec la sangle abdominale.
- Fermer la boucle et ajuster la longueur en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.
- Fermer les boucles des bretelles et ajuster leurs longueurs (voir recto).