



Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

CEINTURE ÉCO

POUR TOUS FAUTEUILS



À N'UTILISER QUE POUR
L'USAGE INDIQUÉ :
PRÉVENIR LES CHUTES

Périmètre maximum utile : + 164 cm
Hauteur de la ceinture : + 11 cm
Boucle : 50 mm

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
Simple et en taille unique, elle est conçue pour différentes utilisations au fauteuil.
Périmètre maximum utile : 164 cm
Sans contrainte de tailles



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.



Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.



CCMED2HP-PF



v 07.02/25

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



CEINTURE ÉCO

Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

Ne pas utiliser cette ceinture si la taille ne convient pas au patient.

- Positionner la ceinture au niveau de l'abdomen du patient (au niveau des hanches) et refermer la boucle au dos du fauteuil.