



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention.  
Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

## CEINTURE SLIM PELVIENNE

POUR TOUS FAUTEUILS

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


À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDICUÉ :  
EMPÊCHER LE GLISSEMENT  
DU BASSIN VERS L'AVANT

Périmètre maximum utile : + 230 cm  
Hauteur de la ceinture et largeur  
partie pelvienne : + 11 cm  
Boucle : 50 mm

Elle a été conçue pour obtenir un confort pelvien accru au fauteuil.

- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation)
- Tour de taille (en cm)



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



CSP2HP-PF

v 06.11/23

## Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



# CEINTURE SLIM PELVIENNE

### Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé de  
mousse polyuréthane  
Biais 100 % polyester  
Sangles 100 % polyester  
Boucles nylon

- Positionner la ceinture pelvienne sur l'assise du fauteuil, la sangle en dessous.
- Passer la boucle de la partie pelvienne entre l'assise et le dossier du fauteuil.
- Asseoir le patient sur le fauteuil et relever entre ses jambes la partie ceinture.
- Ajuster la ceinture autour de l'abdomen du patient.
- Ceinturer le patient et le dossier du fauteuil avec la sangle abdominale.
- Fermer la boucle et ajuster la longueur en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.
- Fermer la boucle de la partie pelvienne et ajuster sa longueur (voir recto).