



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

CEINTURE SLIM PELVIENNE

POUR TOUS FAUTEUILS



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDICUÉ :
EMPÊCHER LE GLISSEMENT
DU BASSIN VERS L'AVANT

Périmètre maximum utile : + 230 cm
Hauteur de la ceinture et largeur
partie pelvienne : + 11 cm
Boucle : 50 mm

Elle a été conçue pour obtenir un confort pelvien accru au fauteuil.

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
- Déclinée en 4 tailles S, M, L, XL
- Périmètre maximum utile : 230 cm (le dossier et l'assise du fauteuil doivent présenter un espace de séparation)
- Tour de taille (en cm)



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.



Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.



CSP2HP-PF

v 07.02/25

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



CEINTURE SLIM PELVIENNE

Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé de
mousse polyuréthane
Biais 100 % polyester
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

- Positionner la ceinture pelvienne sur l'assise du fauteuil, la sangle en dessous.
- Passer la boucle de la partie pelvienne entre l'assise et le dossier du fauteuil.
- Asseoir le patient sur le fauteuil et relever entre ses jambes la partie ceinture.
- Ajuster la ceinture autour de l'abdomen du patient.
- Ceinturer le patient et le dossier du fauteuil avec la sangle abdominale.
- Fermer la boucle et ajuster la longueur en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.
- Fermer la boucle de la partie pelvienne et ajuster sa longueur (voir recto).