



[www.nausicaa-medical.com](http://www.nausicaa-medical.com)

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

## GILET DE BUSTE ECHANCRE

POUR TOUS FAUTEUILS

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


À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :  
PRÉVENIR LA CYPHOSE  
CERVICALE EN MAINTENANT  
LE BUSTE DROIT

Périmètre maximum utile : + 190 cm  
Boucle : 40 mm

Il procure un confort renforcé du buste.

- Décliné en 3 tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements.
- Périmètre maximum utile : 190 cm



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



v 06.11/23

CMB2HP-PF

## Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



# GILET DE BUSTE ECHANCRE

### Composition

Jersey polyester enduit de  
polyuréthane doublé  
de mousse polyuréthane  
Biais 100 % polyester  
Sangles 100 % polyester  
Boucles nylon

- Enfiler le maintien de buste par la tête. Faire passer la sangle de la ceinture au travers du passant, situé à l'extrémité des bretelles de la veste, en ceinturant le dossier du fauteuil. Ajuster les longueurs des sangles en fonction des besoins.