



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

GILET DE BUSTE

POUR TOUS FAUTEUILS



À N'UTILISER QUE POUR L'USAGE INDIQUÉ :
PRÉVENIR LA CYPHOSE
CERVICALE EN MAINTENANT
LE BUSTE DROIT

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
Périmètre maximum utile : + 190 cm
Boucle : 40 mm

Fabriqué dans un tissu respirant, il est facile à mettre en place grâce à ses épaules dégraifables.

- Décliné en 3 tailles S, M, L correspondantes aux tailles de vêtements.
- Périmètre maximum utile : 220 cm



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.



Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.

CGI3-PF



v 07.02/25

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



GILET DE BUSTE

Composition

Chaîne et trame en coton polyester

Filet polyester haute ténacité

Biais 100 % coton

Sangles 100 % polyester

Mousse PE 8 mm

Boucles nylon

- Ouvrir les boucles d'épaule.
- Mettre en place le gilet intégral.
- Refermer les boucles d'épaule.
- Croiser les pans du devant du gilet.
- Faire passer la sangle de ceinture dans la fente prévue à cet effet.
- Ceinturer le dossier du fauteuil en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.
- Passer l'extrémité de la sangle libre dans le passant arrière.
- Refermer la boucle 40 mm.
- Ajuster la longueur de la sangle à l'aide de la boucle nylon (25 mm) pour éviter le basculement vers l'avant, du tronc de la personne.