

Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

GILET YZA

POUR TOUS FAUTEUILS

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


Un gilet, plus un module pelvien en taille unique, vous permettent de passer d'un maintien de buste à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.

- Périmètre maximum utile : 200 cm



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.



YZA2GBHP-PF



Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.



v 07.02/25

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



GILET YZA

Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane
doublé de mousse polyuréthane
Biais 91 % polyamide - 9 % élasthanne
Sangle 100 % polyester
Épaulière en PVC
Boucle nylon

Ne pas utiliser cette ceinture si la taille ne convient pas au patient.

Le gilet YZA se décline sous 2 variantes modulables :

1 - Le gilet YZA de buste (YZA-GB)

- a - La partie pelvienne doit être retournée à l'intérieur du gilet
- b - Mettre en place le gilet de buste, en positionnant bien les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil.
- c - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- d - Ceinturer le patient et le dossier du fauteuil avec la sangle abdominale.
- e - Fermer la boucle et ajuster la longueur en veillant à ne pas comprimer l'abdomen.
- f - Passer une sangle d'épaule sous la sangle de maintien abdominal, connecter les boucles, et ajuster sa longueur.

2 - Le gilet YZA intégral (YZA-GI) se compose du gilet YZA de buste à laquelle vient s'ajouter un module de maintien pelvien.

- a - Positionner le module de maintien pelvien sur l'assise du fauteuil, et fixer la sangle 25 mm au dossier du fauteuil avec le minimum de jeu.
- b - Asseoir le patient sur le fauteuil et sur la sangle.
- c - Mettre en place le gilet de buste, en positionnant bien les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil.
- d - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- e - Fermer la boucle nylon de la sangle abdominale, puis ajuster la longueur de la sangle, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.
- f - Passer la sangle du maintien pelvien dans le passant de la partie pelvienne. Fermer la boucle 50 mm du maintien pelvien en ajustant sa longueur.



Compatible avec le système NAUSI-SURE
à clé magnétique.
Nous consulter pour plus d'information.