

## MAINTIEN ABDOMINAL «EVOLUTION»

Votre correspondant :

### RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

• Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. **Ce n'est pas un système de contention.**

**Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.**

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.
- Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles et que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

### Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé  
de mousse polyuréthane  
Biais 100% polyester  
Sangle 100 % polyester  
Épaulière en PVC  
Boucle nylon

# NOTICE D'UTILISATION

La ceinture «Evolution» se décline sous 4 variantes modulables :

## 1 - Le maintien abdominal «Evolution»

(Réf.: YZA2CAHP-PF)

- Asseoir le patient au fauteuil.
- Positionner la ceinture au niveau de la taille de sorte que l'étiquette bleu - blanc - rouge soit en haut.
- Amener les deux sangles derrière le dossier du fauteuil.
- Clipser la boucle femelle dans la boucle mâle puis ajuster le serrage en tirant sur les sangles. Ranger l'excédent de sangle dans les clips plastique présents.



## 2 - Le maintien pelvien «Evolution»

(Réf.: YZA2CAHP-PF + YZA2-MP-PF) se compose du maintien abdominal auquel vient s'ajouter un module de maintien pelvien.

- Avant d'asseoir le patient, installer le module pelvien en passant les sangles autour de la base du dossier du fauteuil et clipser les boucles entre elles. Le module pelvien doit être mis à plat matelassé vers le haut et pendre légèrement devant l'assise du fauteuil (**module pelvien non présent dans ce paquet**).
- Asseoir le patient dans le fauteuil et installer la ceinture abdominale comme indiqué dans le paragraphe « 1 ».
- Venir clipser la boucle mâle du module pelvien dans la boucle femelle présente dans le bas de la ceinture abdominale et ajuster le serrage au plus près du patient.



## 3 - Le maintien de buste «Evolution»

(Réf.: YZA2CAHP-PF + YZA2-MB-PF) se compose du maintien abdominal auquel vient s'ajouter un module de maintien de buste.

- Installer la ceinture abdominale comme indiqué dans le paragraphe « 1 ».
- Positionner les bretelles du module de buste sur les épaules du patient, la boucle mâle devant et les épaulières ajustées picots côté vêtements (**module de buste non présent dans ce paquet**).
- Clipser la boucle mâle du maintien de buste avec la boucle femelle présente dans la ceinture abdominale partie haute.
- Le reste du maintien de buste doit pendre derrière le dossier du fauteuil, passer la boucle femelle entre le dossier et la sangle de la ceinture abdominale et venir la clipser à sa boucle mâle enfin ajuster le serrage.



## 4 - Le maintien intégral «Evolution»

(Réf.: YZA2CAHP-PF + YZA2-MP-PF + YZA2-MB-PF) se compose du maintien abdominal auquel vient s'ajouter un module de maintien de buste et un module de maintien pelvien.

- Installer la ceinture abdominale comme indiqué dans le paragraphe « 1 ».
- Installer le module pelvien comme indiqué paragraphe « 2 » (**module pelvien non présent dans ce paquet**).
- Enfin installer le module de buste comme indiqué au paragraphe « 3 » (**module de buste non présent dans ce paquet**).

