

MAINTIEN DE BUSTE «EVOLUTION»

Votre correspondant :

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

• Ce dispositif m dical est destin  au maintien et au positionnement du patient. **Ce n'est pas un syst me de contention.**

Ce dispositif m dical doit  tre manipul  uniquement par du personnel form  (par un professionnel de sant ) et qualifi    son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif m dical, il y a un risque d'accident pour le patient.

- Afin d'assurer un maximum d'efficacit    l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas  tre mis au contact direct d'une peau l s e.
- Avant chaque utilisation, il est important de v rifier : la pr sence de l' tiquette, les pi ures des sangles et que le dispositif ne pr sente pas de d chirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissur es ou ne pr sentent pas de faiblesses d'attaches.

Composition

Sangle 100 % polyester
 pauli re en PVC
Boucle nylon

NOTICE D'UTILISATION

Le module de buste « Evolution » permet 2 variantes de maintien.

1 - Le maintien de buste «Evolution»

(Réf.: YZA2CAHP-PF + YZA2-MB-PF) se compose du maintien abdominal auquel vient s'ajouter un module de maintien de buste.

- a - Asseoir le patient au fauteuil.
- b - Positionner la ceinture de maintien abdominale au niveau de la taille de sorte que l'étiquette bleu - blanc - rouge soit en haut. **(ceinture non présente dans ce paquet).**
- c - Amener les deux sangles derrière le dossier du fauteuil.
- d - Clipser la boucle femelle dans la boucle mâle puis ajuster le serrage en tirant sur les sangles. Ranger l'excédent de sangle dans les clips plastique présents.
- e - Positionner les bretelles du module de buste sur les épaules du patient, la boucle mâle devant et les épaulières ajustées picots côté vêtements.
- f - Clipser la boucle mâle du maintien de buste avec la boucle femelle présente dans la ceinture abdominale partie haute.
- g - Le reste du maintien de buste doit pendre derrière le dossier du fauteuil, passer la boucle femelle entre le dossier et la sangle de la ceinture abdominale et venir la clipser à sa boucle mâle enfin ajuster le serrage.



2 - Le maintien intégral «Evolution»

(Réf.: YZA2CAHP-PF + YZA2-MP-PF + YZA2-MB-PF) se compose du maintien abdominal auquel vient s'ajouter un module de maintien de buste et un module de maintien pelvien.

- a - Avant d'asseoir le patient, installer le module pelvien en passant les sangles autour de la base du dossier du fauteuil et clipser les boucles entre elles. Le module pelvien doit être mis à plat matelassé vers le haut et pendre légèrement devant l'assise du fauteuil. **(module pelvien non présent dans ce paquet).**
- b - Asseoir le patient au fauteuil.
- c - Positionner la ceinture au niveau de la taille de sorte que l'étiquette bleu - blanc - rouge soit en haut. **(ceinture non présente dans ce paquet).**
- d - Amener les deux sangles derrière le dossier du fauteuil.
- e - Clipser la boucle femelle dans la boucle mâle puis ajuster le serrage en tirant sur les sangles. Ranger l'excédent de sangle dans les clips plastique présents.
- f - Venir clipser la boucle mâle du module pelvien dans la boucle femelle présente dans le bas de la ceinture abdominale et ajuster le serrage au plus près du patient.
- g - Installer le module de buste comme indiqué au paragraphe « 1 » ci-dessus.

