

www.nausicaa-medical.com

MAINTIEN PELVIEN «EVOLUTION»

Votre correspondant :

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

• Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. **Ce n'est pas un système de contention.**

Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.
- Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles et que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

Composition

Jersey polyester enduit de polyuréthane doublé
de mousse polyuréthane
Sangle 100 % polyester
Épaulière en PVC
Boucle nylon

NOTICE D'UTILISATION

Le module pelvien « Evolution » permet 2 variantes de maintien.

1 - Le maintien pelvien «Evolution»

(Réf.: YZA2CAHP-PF + YZA2-MP-PF) se compose du maintien abdominal auquel vient s'ajouter un module de maintien pelvien.

a - Avant d'asseoir le patient, installer le module pelvien en passant les sangles autour de la base du dossier du fauteuil et clipser les boucles entre elles. Le module pelvien doit être mis à plat matelassé vers le haut et pendre légèrement devant l'assise du fauteuil.

b - Asseoir le patient au fauteuil.

c - Positionner la ceinture abdominale au niveau de la taille de sorte que l'étiquette bleu - blanc - rouge soit en haut. **(ceinture non présente dans ce paquet).**

d - Amener les deux sangles derrière le dossier du fauteuil.

e - Clipser la boucle femelle dans la boucle mâle puis ajuster le serrage en tirant sur les sangles. Ranger l'excédent de sangle dans les clips plastique présents.

f - Venir clipser la boucle mâle du module pelvien dans la boucle femelle présente dans le bas de la ceinture abdominale et ajuster le serrage au plus près du patient.



2 - Le maintien intégral «Evolution»

(Réf.: YZA2CAHP-PF + YZA2-MP-PF + YZA2-MB-PF) se compose du maintien abdominal auquel vient s'ajouter un module de maintien de buste et un module de maintien pelvien.

a - Installer le module pelvien comme indiqué dans le paragraphe « 1 » ci-dessus.

b - Installer la ceinture abdominale comme indiqué dans le paragraphe « 1 » ci-dessus **(ceinture non présente dans ce paquet).**

c - Positionner les bretelles du module de buste **(module de buste non présent dans ce paquet)** sur les épaules du patient, la boucle mâle devant et les épaulières ajustées picots côté vêtements.

d - Clipser la boucle mâle du maintien de buste avec la boucle femelle présente dans la ceinture abdominale partie haute.

e - Le reste du maintien de buste doit pendre derrière le dossier du fauteuil, passer la boucle femelle entre le dossier et la sangle de la ceinture abdominale et venir la clipser à sa boucle mâle enfin ajuster le serrage.

