



Sangle de toilette **Confort**

Ce type de sangle est déconseillé aux patients à très faible tonicité.

- Disponible uniquement en jersey confort
- Tailles S, M, L, XL.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE

FABRICATION FRANÇAISE

RÉF.	STC-PF (jersey confort)
OPTION	TABAL-PF (têteière amovible et baleinée)



Cette nouvelle sangle propose une forme en U élargie qui dégage complètement les fesses du patient facilitant ainsi le positionnement aux toilettes et permet de baisser un pantalon très bas. Sa forme spécifique permet un positionnement au plus près du creux poplité ce qui permet de baisser un pantalon à mi-fémur. Le passage des jambières se fait de l'extérieur vers l'intérieur. **Cette sangle possède 2 accroches intermédiaires supplémentaires permettant de réduire les points de pression** (sous-axillaire ou creux poplité).

Réglage **des accroches**



Le système d'accroche par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

Positionnement **des sangles**



DECROISÉ

Choix conseillé