



Sangle en U à dossieret

- Disponible uniquement en jersey confort
- Tailles S, M, L, XL



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

RÉF. SGLDOS-PF (jersey confort)



La partie dos prolongée par la tête en mousse rigide et le baleinage complet permettent de prendre en charge la colonne vertébrale lors des transferts et des ramassages au sol. Cette sangle très rigide évite les pressions ou les courbures lors des transferts. Les attaches sont reprises au niveau des côtes flottantes afin de parfaitement envelopper les patients. Elle est particulièrement **adaptée pour les patients ayant subi une arthrodèse**. Sa mise en place peut être effectuée uniquement sur un patient en position assise.

Réglage des accroches




Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal, nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

Positionnement des sangles



DECROISÉ

Choix conseillé

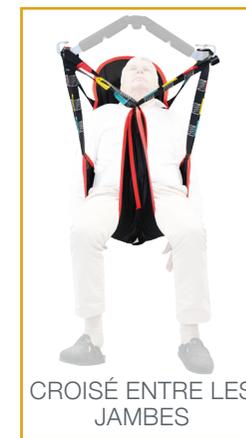

CROISÉ ENTRE LES JAMBES

Choix secondaire