



## Ramassage au sol du patient

Notre lève-personne Nausifyl vous permet d'effectuer un ramassage au sol. Les sangles à utiliser sont :

- Sangles hamac
- Sangles en U



Lors d'un ramassage au sol, il convient :

- De sécuriser la nuque du patient à l'aide d'une têtère rigide ou d'une têtère à attaches (cf p 28).
- Si vous ne disposez pas de têtère, il faut accompagner la nuque du patient avec sa main.
- La tête du patient doit être à l'opposé du mât évitant ainsi les chocs lors du levage.
- Pour faciliter le passage des pieds du lève-personne, ils doivent être écartés, le premier le long du corps et le second sous la plicature des deux genoux.



DÉMONSTRATION VIDÉO

SCANNEZ  
MOI

