



[www.nausicaa-medical.com](http://www.nausicaa-medical.com)

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus).

## APPAREIL DE SOUTIEN PARTIEL DE LA TÊTE



Le dispositif amovible de soutien partiel de la tête s'utilise sur les sangles : SURP2-PF, SUP2-PF, SURP2-PF, HA2-RBA-PF, SUBAS2-PF, SUBAI-PF, SUCBAS2-PF, SUCBAI-PF, SST-PF, SSTBA-PF, SHA2-PF, SHAC2-PF, SHA2BA-PF, SHAC2BA-PF, SUCPEHA2-PF, SUCBAHA2-PF.

Se glisse la pointe vers le haut entre le dos du patient et la sangle. Une fois la sangle sous tension, la têtère sera maintenue.

TAMOV-PF



Le dispositif amovible et baleiné de soutien partiel de la tête s'utilise sur les sangles : STORP2-PF, SATL-PF, STO-PF.

Se glisse la partie la plus étroite vers le bas entre la sangle et le patient. Une fois la sangle sous tension, la têtère sera maintenue.

TABAL-PF



L'appui-tête TAAT-PF est utilisé sur les sangles : SUBAS2-PF, SUBAI-PF, SUCBAS2-PF, SUCBAI-PF, SHA2-PF, SHAC2-PF, SHA2BA-PF, SHAC2BA-PF, SUCPEHA2-PF, SUCBAHA2-PF

Elle vient se connecter aux sangles via les deux bouts de sangle de 50 mm placées de part et d'autre de la poignée située en haut de la sangle au niveau de la nuque. La têtère une fois fixée fait partie intégrante de la sangle et vient s'attacher aux mêmes crochets que pour les épaules.

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
TAAT-PF



Retirer les baleines aluminium avant de mettre l'appareil de soutien partiel de la tête dans une machine à laver.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



TAMOV-PF/TABAL-PF



v 06.09/23