



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus).

APPAREIL DE SOUTIEN PARTIEL DE LA TÊTE



Le dispositif amovible de soutien partiel de la tête s'utilise sur les sangles : SURP2-PF, SUP2-PF, SURP2-PF, HA2-RBA-PF, SUBAS2-PF, SUBAI-PF, SUCBAS2-PF, SUCBAI-PF, SST-PF, SSTBA-PF., SHA2-PF, SHAC2-PF, SHA2BA-PF, SHAC2BA-PF, SUCPEHA2-PF, SUCBAHA2-PF.
Se glisse la pointe vers le haut entre le dos du patient et la sangle. Une fois la sangle sous tension, la têtère sera maintenue.

TAMOV-PF



Le dispositif amovible et baleiné de soutien partiel de la tête s'utilise sur les sangles : STORP2-PF, SATL-PF, STO-PF.

Se glisse la partie la plus étroite vers le bas entre la sangle et le patient. Une fois la sangle sous tension, la têtère sera maintenue.

TABAL-PF



L'appui-tête TAAT-PF est utilisé sur les sangles : SUBAS2-PF, SUBAI-PF, SUCBAS2-PF, SUCBAI-PF, SHA2-PF, SHAC2-PF, SHA2BA-PF, SHAC2BA-PF, SUCPEHA2-PF, SUCBAHA2-PF

Elle vient se connecter aux sangles via les deux bouts de sangle de 50 mm placées de part et d'autre de la poignée située en haut de la sangle au niveau de la nuque. La têtère une fois fixée fait partie intégrante de la sangle et vient s'attacher aux mêmes crochets que pour les épaules.

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
TAAT-PF



Retirer les baleines aluminium avant de mettre l'appareil de soutien partiel de la tête dans une machine à laver.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



TAMOV-PF/TABAL-PF



v 06.09/23

www.nausicaa-medical.com

This medical device is intended for patient positioning. This is not a restraint system. Before each use, it is important to check: the presence of the label, the stitches of the straps: that they do not fray or break, that the device does not show tears, snags, holes or signs of fraying (fabric and straps), that the buckles are not cracked or have no weak fastening.

HEADREST



The removable TAMOV-PF headrest is used on the straps.

TAMOV-PF



The TABAL-PF removable and woven headrest is used on the straps.

TABAL-PF

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


The TAAT-PF headrest is used on the straps

TAAT-PF



Remove the aluminium bar before putting the headrest in the washing machine.



The use of the device requires the presence and vigilance of a third person. When used by an agitated or disoriented person, monitoring becomes imperative. This medical device must be implemented or trained by a health professional.



TAMOV-PF / TABAL-PF / TAMAX-PF

v 06.09/23