



Sangle en U Premium filet

- Disponible uniquement en filet et filet confort
- Tailles XS (uniquement en filet confort) S, M, L, XL.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

RÉF.	SUBAI-PF (filet) SUCBAI2-PF (filet confort)
OPTION	TAAT-PF TAMOV-PF



La sangle filet est idéale pour le bain et la toilette car elle sèche rapidement. Cette sangle est également proposée en filet confort avec mousse confort au niveau des jambières afin de réduire le cisaillement. La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Réglage des accroches



Le système d'accroche sur fléau 2 points ou 4 points permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal, nous conseillons de régler la sangle en position assise avec un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

Positionnement des sangles



CROISÉ SOUS LES JAMBES

Choix conseillé



CROISÉ SOUS LES JAMBES

Choix secondaire