



Sangle en U Premium jersey

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert. La mousse confort au niveau des jambières permet de réduire le cisaillement.

- Disponible uniquement en jersey et jersey confort
- Tailles XS (uniquement en jersey confort) S, M, L, XL.

Réglage des accroches



Le système d'accroche sur fléau 2 points ou 4 points permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal, nous conseillons de régler la sangle en position assise avec un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

Positionnement des sangles



CROISE ENTRE LES JAMBES

Choix conseillé



CROISÉ SOUS LES JAMBES

Choix secondaire



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	SUBAS2-PF- (jersey) SUCBAS2-PF- (jersey confort)
OPTION	TAAT-PF (tête à attaches) TAMOV-PF (tête amovible)