

ISO 13485

BUREAU VERITAS
Certification



NAUSICAA

MEDICAL

www.nausicaa-medical.com

Fabriqué en France
dans nos ateliers
depuis 1992



Ce dispositif médical est destiné au maintien & au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

CEINTURE DE BUSTE ECO EVOLUTIVE



CECO3-PF-B

À N'UTILISER QUE POUR
L'USAGE INDIQUÉ :
PRÉVENIR LES CHUTES



CECO3-MP

Une ceinture de buste, plus un module pelvien en taille unique vous permettent de passer d'un maintien abdominal à un maintien intégral en fonction de l'évolution des besoins sans contrainte de tailles.

- Périmètre maximum utile : 228 cm



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.



Ce dispositif médical doit être manipulé uniquement par du personnel formé (par un professionnel de santé) et qualifié à son utilisation (destination d'usage, installation et environnement d'utilisation, ...). En cas de mauvaise installation du dispositif médical, il y a un risque d'accident pour le patient.

CECO3-PF-B / CECO3-MP



v 06.02/25

Matériaux textiles
conformes à la législation
REACH
sur les substances indésirables

NAUSICAA Médical
12 Allée du Plot - ZA Pôle Actif
30660 Gallargues le Montieux
FRANCE



Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



CEINTURE DE BUSTE ECO EVOLUTIVE

Composition
Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Jersey 100 % polyester
Biais 100 % coton
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser cette ceinture si la taille ne convient pas au patient.

La Ceinture de buste eco evolutive se décline sous 2 variantes modulables :

1 -la Ceinture ECO de Buste (CECO3-PF-B) se compose de la Ceinture ECO Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien de Buste.

- a - Positionner la ceinture au niveau de la taille de la personne.
- b - Passer les sangles derrière le dossier du fauteuil.
- c - Fermer la boucle nylon, puis ajuster la longueur des sangles, en veillant à ne pas comprimer l'abdomen du patient.
- d - Mettre en place le baudrier, fermer la boucle de 50 mm, positionner les épaulières sur les épaules de la personne, les boucles derrière le dossier du fauteuil. Passer une sangle d'épaule sous la sangle de maintien abdominal, connecter les boucles, et ajuster sa longueur.

2 -la Ceinture ECO Intégrale (CECO-MP) se compose de la Ceinture ECO Abdominale à laquelle vient s'ajouter un Module de Maintien de Buste et un Module de Maintien Pelvien.

a - Pour la mise en place de la ceinture ECO Intégrale, procéder d'abord comme pour la ceinture ECO Pelvienne (2) puis comme le paragraphe d et e de la ceinture ECO de Buste (3).



Modèle CECO3 + Module de Buste



Modèle CECO3 + Module de Buste +
Module pelvien