

# SANGLE EN U PREMIUM FILET

- Disponible en filet et en filet confort
- Tailles S, M, L et XL.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE  
FABRICATION FRANÇAISE

RÉF.	SUBAI-PF (filet) SUCBAI2-PF (filet confort)
OPTION	TAAT-PF TAMOV-PF



La sangle filet est idéale pour le bain et la toilette. Elle évite la macération et sèche rapidement.

Cette sangle est proposée en filet confort avec mousse confort dans les jambières afin de réduire le cisaillement.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant. Cette sangle ne doit pas rester sous le patient.

## RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

## POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ SOUS LES JAMBES

Choix conseillé



CROISÉ SOUS LES JAMBES

Choix secondaire

## TÊTIÈRE (OPTION)

La têtère à attaches (TAAT-PF) et la têtère amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en option.

