



Sangle de verticalisateur **Verticonfort**

- Disponible uniquement en jersey confort
- Tailles S, M, L, XL.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF. SVERTICONF-PF



La sangle se positionne en bas du dos (au niveau des lombaires) en position assise.

La sangle doit être en tension et accrochée au 1er ou 2ème cran (vert ou jaune) sur le bras du verticalisateur.

Il est impératif de choisir la bonne taille correspondant au gabarit du patient (cf guide des tailles p 21).

Réglage **des accroches**



Position classique : Vert ou jaune (1er ou 2ème cran), si le patient présente un tonus relatif au niveau du buste.

Position croisée : Rouge ou noir (3ème ou 4ème cran), si le patient présente un manque de tonus au niveau du buste et des membres inférieurs.

Positionnement **des sangles**



NON CROISÉ

Bonne tonicité du buste



CROISÉ

Manque de tonicité du buste

Sangle verticonfort et sangle de verticalisateur Premium :

Pour les patients hémiplegiques, possibilité d'utiliser un cran plus court du côté faible (ex : vert du côté faible et jaune du côté fort) pour compenser la faiblesse du tonus (uniquement verticalisateur).