

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

## SANGLE DE REHAUSSEMENT



Compositions Modèles :  
Complexage Stéirithane  
Sangle polyester 40 mm - rouge  
Biais polyester 22 mm - noir  
Poignée polyamide

Cette aide technique est destinée aux aidants ou soignants afin de les aider à remonter un patient à faible participation physique dans le lit à moindre effort et en préservant leurs dos.

### Les + produit :

- Aide à lutter contre les TMS liées au port de charges lourdes et/ou aux mauvaises postures.
- Poignée rigides pour un confort accru et une meilleure préhension
- Facile à utiliser et nettoyer



Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.



SRL-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.





## **Recommandations d'utilisation :**

### **Utilisation par une seule personne :**

La sangle de rehaussement doit être accrochée d'un côté du lit à un point fixe vers le haut de celui-ci (sommier, potence). Le fourreau matelassé doit être placé au niveau du fessier du patient. L'aidant ou le soignant récupère l'autre extrémité de la sangle de l'autre côté du lit et pratiquera un mouvement de fente pour rehausser le patient. Le patient peut s'il en est capable participer en regardant son ventre et en tirant sur la poignée de potence et/ou en poussant sur ses pieds.

### **Utilisation par deux personnes :**

Le fourreau est placé au niveau du fessier du patient, une personne de chaque côté du lit tenant la sangle par ses poignées. Les deux personnes synchronisent leurs mouvements pour remonter le patient en haut du lit. Comme évoqué au précédent paragraphe, le patient peut éventuellement participer à hauteur de ses capacités.

### **Utilisation avec drap de glisse :**

La sangle de rehaussement peut être utilisée combinée avec un drap de glisse mis en place au préalable. Cette combinaison permet le rehaussement sans effort de patients plus lourds et ou à moindre capacité physique de participation.